



walimed
SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS HOSPITALARES



CATÁLOGO
Curason

Características

O Curason é um desbridador de feridas com a combinação de abrasão mecânica e microlimpeza através do ultrassom. Com um design especial, ele retira o biofilme de forma segura e eficaz

Através de três mecanismos de ação (Macroabrasão, Microabrasão e Ultrassom), o Curason limpa a ferida de forma suave e vigorosa ao mesmo tempo.

Sem necessidade de limpeza das escovas, somente descartar as mesmas




Indicações


Indicado para todo tipo de ferida onde haja a necessidade de desbridamento incluindo:

- Desbridamento cirúrgico de feridas ou extremidades
- Sutura de extensos ferimentos com ou sem desbridamento, lesões de pele e tecido celular subcutâneo
- Sutura de pequenos ferimentos com ou sem desbridamento, lesões de pele e tecido celular subcutâneo

O produto é composto por:

- Cabeça de limpeza estéril de uso único (parte aplicada)
- Dispositivo portátil reutilizável (cabo ultrassônico)
- Carregador de tomada reutilizável

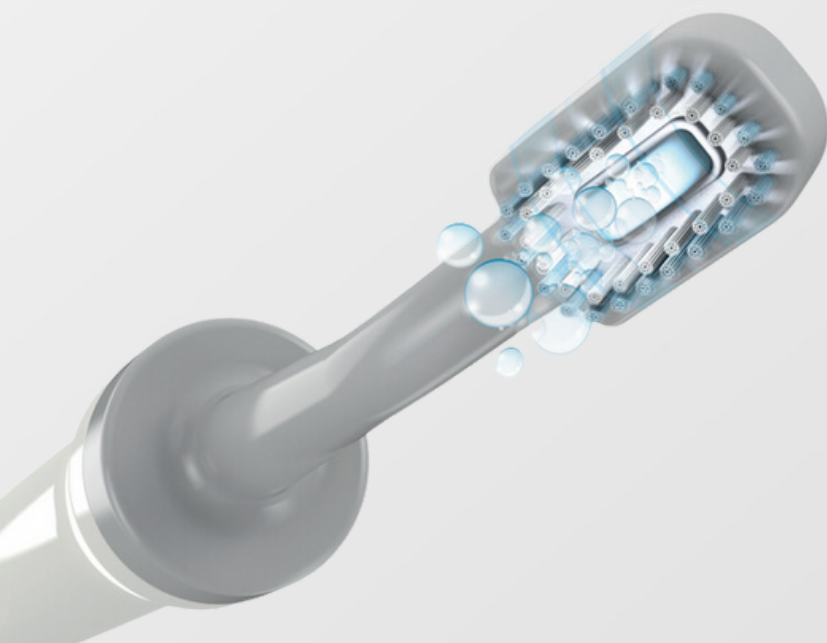

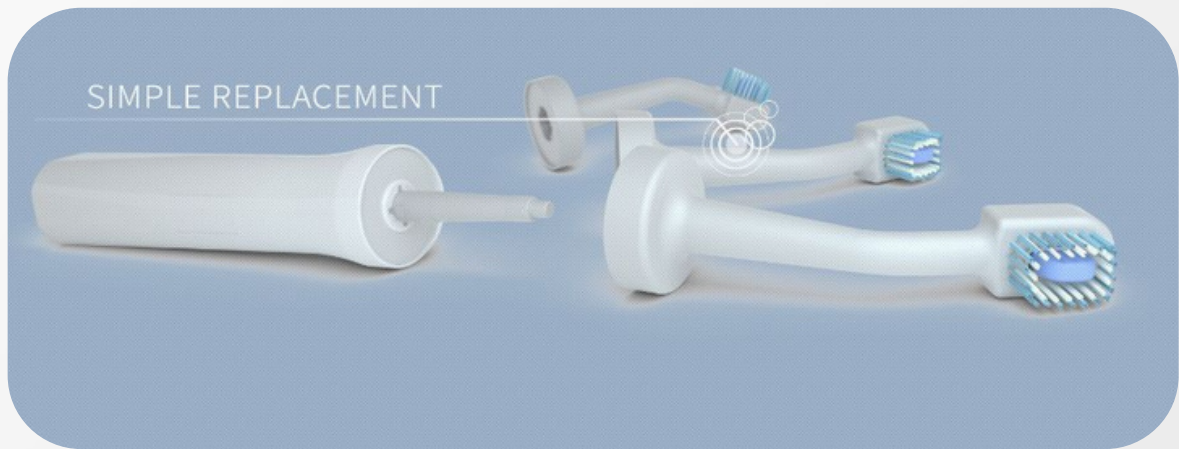

O Curason é capaz de realizar uma limpeza poderosa e gentil ao mesmo tempo, sem lesionar a ferida.



Graças ao seu design especial, a operação de limpeza dos aparelhos não é necessária. Após o tratamento, a cabeça de limpeza é simplesmente descartada adequadamente

Instrução de uso

O Curason pode ser utilizado em centro cirúrgico ou ambulatório. A carga inicial precisa ser de 8 horas, tendo um funcionamento com carga total de até 6 horas sem necessidade de recarga.

A escova é de uso único e descartável (estéril) e a caneta acenderá a luz verde somente quando estiver conectada à escova.

Para iniciar o desbridamento segure o botão iniciar por 5 segundos, é necessário um condutor líquido para utilizar o Curason, podendo ser este:

- Soro fisiológico
- Solução antisséptica

O líquido na utilização do Curason é somente para conduzir as bolhas ultrassônicas.

Cada escova deve ser utilizada para uma única ferida apenas.

